

So funktioniert Ihr neuer Rollator



VOLARIS
SWEDEN AB

Gebrauchsanweisung für: S7 SMART
S7 SMART Low
S7 SMART Shadow Line

Art.Nr.
1422170
1522160
1421170


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Rollator!

Der Volaris S7 wird in vieler Hinsicht Ihren Alltag erleichtern. Wir bitten Sie, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu studieren, damit Sie sich mit Ihrem neuen Rollator vertraut machen können. Richtiger Gebrauch und sorgfältige Pflege bedeuten für Sie mehr Nutzen und erhöhte Sicherheit, für Ihren S7 eine längere Lebensdauer.


Der S7 gibt Ihnen eine wertvolle Stütze auf Ihren Wegen. Er sollte nur als Gehhilfe gebraucht werden. Der Sitz hält garantiert 140 kg Gewicht. Die Maße des S7, auseinandergeklappt bzw. zusammengeklappt, können Sie weiter unten sehen. Sie können Ihren S7 mit verschiedenem Zubehör für Sicherheit und Komfort ausstatten.

Inhalt

Einstellung der Handgriffe	Seite 3
Verstellung der Sitzhöhe	Seite 3
Auseinander- und zusammenklappen des S7	Seite 4
So bremst man	Seite 5
Bremseneinstellung	Seite 6
Fahrtips	Seite 7
Unterhalt, Reinigung	Seite 9
Fehlersuche	Seite 10
Sicherheitszubehör	Seite 11
Komfortzubehör	Seite 12
Garantie	Seite 13

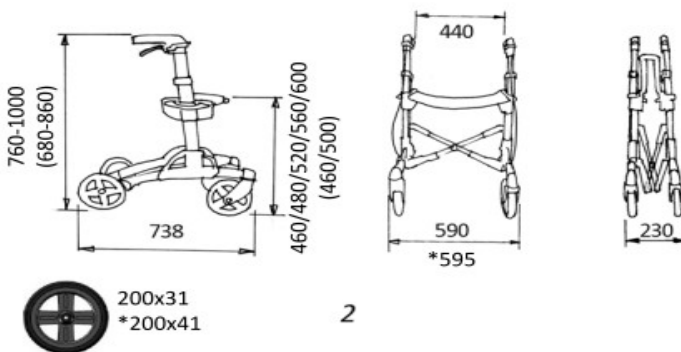


Höheneinstellung der Handgriffe

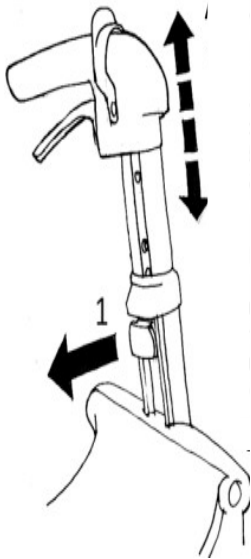


Durch Herausziehen der Knopfes (1) lassen sich die Handgriffe auf eine Höhe zwischen 76 und 100cm einstellen. Stellen Sie sich gerade aufgerichtet vor den Rollator. Die Höhe ist richtig eingestellt, wenn sich Ihre Hände auf gleicher Höhe wie die Handgriffe befinden. Nach einiger Zeit werden Sie selbst feststellen, ob die Höhe noch justiert werden muss. Wenn Sie mit dem S7 unterwegs sind, sollten Sie auch ein bequemes Gefühl haben

Verstellung der Sitzhöhe

Ziehen Sie den orangefarbenen Knopf unter dem Sitz heraus. Heben Sie gleichzeitig den Sitz an oder drücken Sie ihn auf gewünschte Höhe hinunter. Prüfen Sie, ob der Knopf wieder einrastet. Damit ist der Sitz gesperrt. Wiederholen Sie die Prozedur auf der anderen Seite. Es ist wichtig, dass sich der Sitz in waagerechter Stellung befindet, bevor man den Rollator wieder gebraucht. Drücken Sie dann die mittlere Platte im Sitz nach unten.

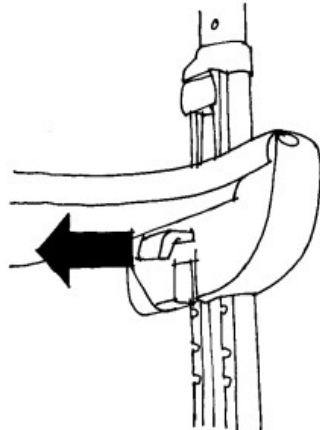


Auseinanderklappen des S7

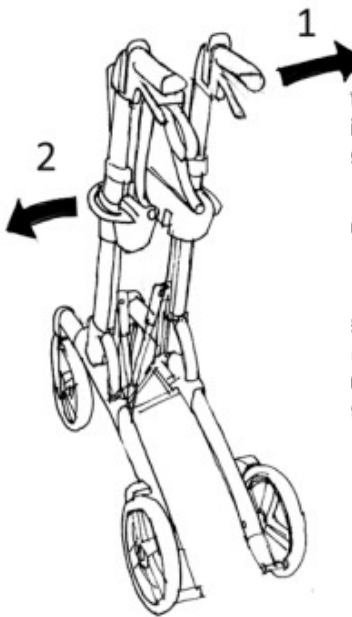


1. Fassen Sie den einen Handgriff mit einer Hand und kippen Sie den S7 etwas zur Seite, sodass das Rad auf dieser Seite wenige Zentimeter angehoben wird.

2. Ziehen Sie den Hebehandgriff auf der anderen Seite nach außen. Eine Feder erleichtert das Ausklappen.

3. Drücken Sie die Mittelplatte auf dem Sitz nach unten, der Rollator wird damit verriegelt

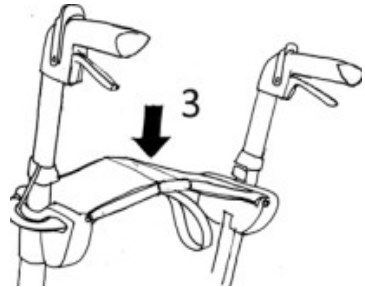


Zusammenklappen des S7

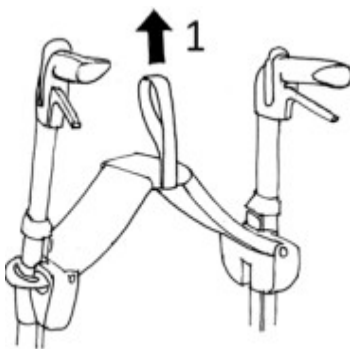


Nehmen Sie den Korb ab (falls vorhanden)

1. Ziehen Sie das orangefarbene Band nach oben.

2. Drücken Sie den S7 mit den Handgriffen an der Seite zusammen.

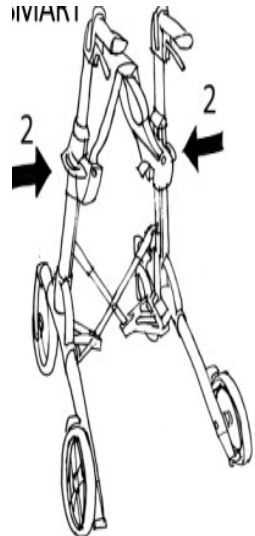


So bremst man sicher

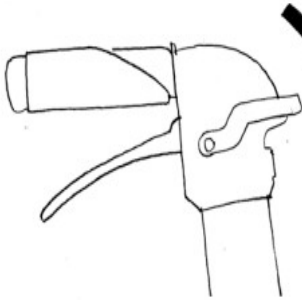

Parkbremse


Die Parkbremse wird betätigt, indem man den orangefarbenen Hebel nach vorn kippt und mit einem Klick sperrt.

Kippen Sie den orangefarbenen Hebel der Parkbremse nach oben um die Bremse zu lösen. Siehe Skizzen.

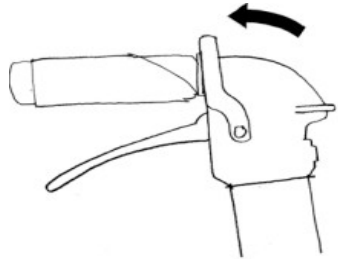

Fahrtbremse

Die Bremse wird durch Hochdrücken der Handgriffunterseite betätigt.

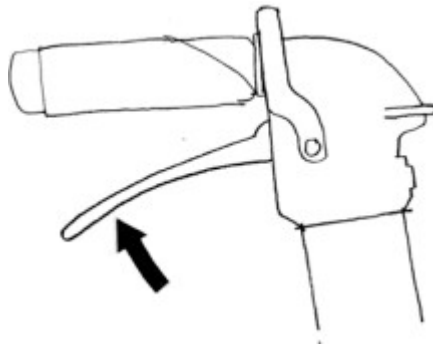


Einstellen der Bremse für richtige Funktion

Die Bremswirkung lässt sich durch Änderung der Bremsdrahtlänge justieren

1. Lösen Sie die Parkbremse.
2. Lösen Sie die Gegenmutter wie auf der Skizze gezeigt.
3. Drehen Sie die Stellschraube gegen den Uhrzeigersinn, wenn Sie die Bremswirkung verstärken wollen. Drehen Sie die Stellschraube im Uhrzeigersinn, wenn Sie die Bremswirkung verringern wollen.
4. Kontrollieren Sie den Abstand zwischen der Bremsbacke und dem Rad.

Der Abstand soll ca. 2 mm betragen. Wenn Sie die Bremse zu hart einstellen, lässt sich die Parkbremse nur schwerfällig betätigen.


5. Ziehen Sie die Gegenmutter wieder an.

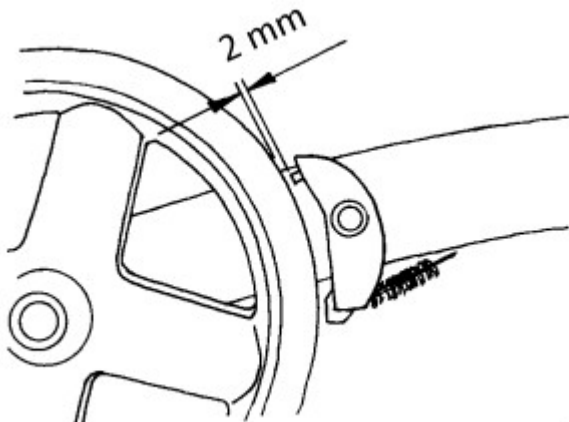

Fahrtips

Der S7 verfügt über ein Komfortchassis, das ein weiches Überfahren von Unebenheiten ermöglicht. Wenn Sie über ein größeres Hindernis fahren müssen oder eine Bürgersteigkante überwinden wollen, hilft Ihnen die an den Hinterrädern befindliche Kipphilfe.


Treten Sie auf eine der Fußpedale und heben Sie gleichzeitig die Handgriffe nach oben.

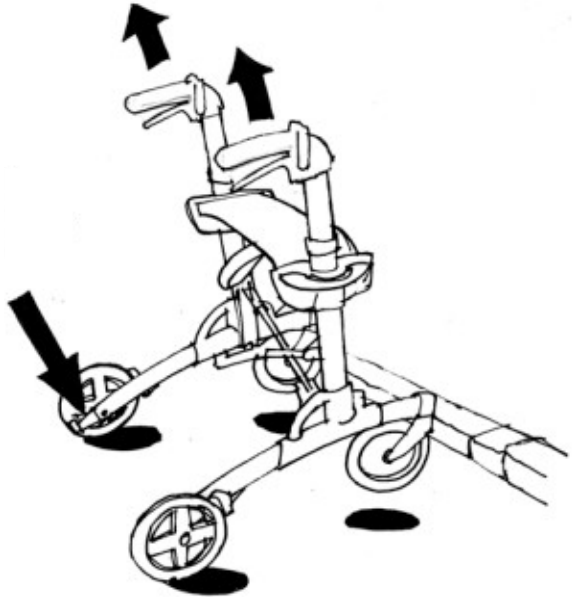

Heben Sie nicht den Sitz an, wenn Sie ein Hindernis überqueren! Sie klappen damit den Rollator zusammen.

Lernen Sie die "Scherentechnik".

Fahren Sie schräg auf das Hindernis zu. Bremsen Sie die eine Seite. Kippen Sie den S7 etwas nach hinten, so dass die Vorderräder nach oben gehen. Dann drehen Sie den Rollator mit den hochstehenden Vorderrädern über das Hindernis. Das geht schnell, wenn Sie es einmal gelernt haben.

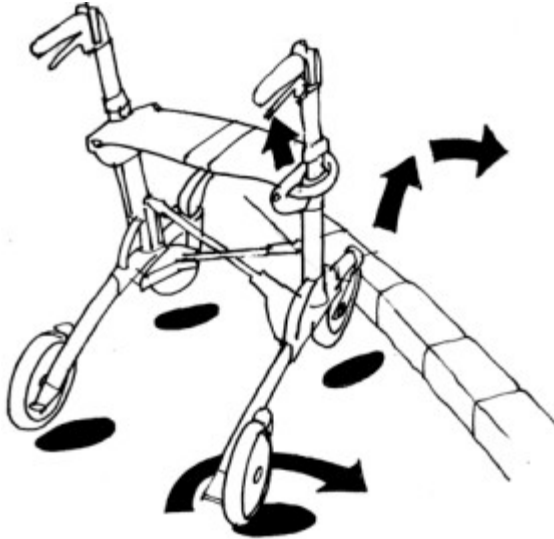

Für Ihre Sicherheit!

Legen Sie die Parkbremse ein, bevor Sie sich auf den S7 setzen!


Lassen Sie niemals, jemand auf dem Rollator sitzen, wenn Sie damit fahren!

Unterhalt

Sorgfältige Pflege des S7 lohnt sich. Dann hält er nämlich länger.

Reinigung

Entfernen Sie den Schmutz mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.

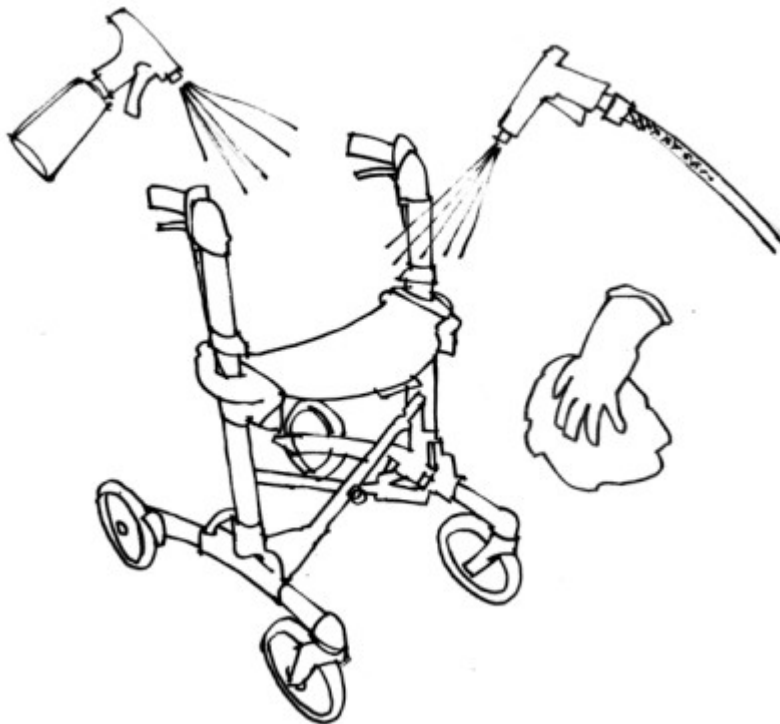


Achten Sie darauf, dass sich zwischen den Rädern und den Bremsbacken kein Schmutz sammelt. Das gefährdet die Bremswirkung!

Sie können den S7 auch mit einem Hochdruck- oder einem Gartenschlauch abspritzen, wobei Sie von oben spritzen müssen. Anschliessend ist der S7 sorgfältig abzuledern

Schmieren des Bremsdrahts

Nach der Wäsche ist der Bremsdraht oben am Handgriff und unten am Hinterrad zu schmieren. Heben Sie den Handgriff der Fahrtbremse an und geben Sie auf den oberhalb der Stellschraube sichtbaren Draht einige Tropfen Öl. Schmieren Sie den Draht auch innerhalb der Feder am Hinterrad.

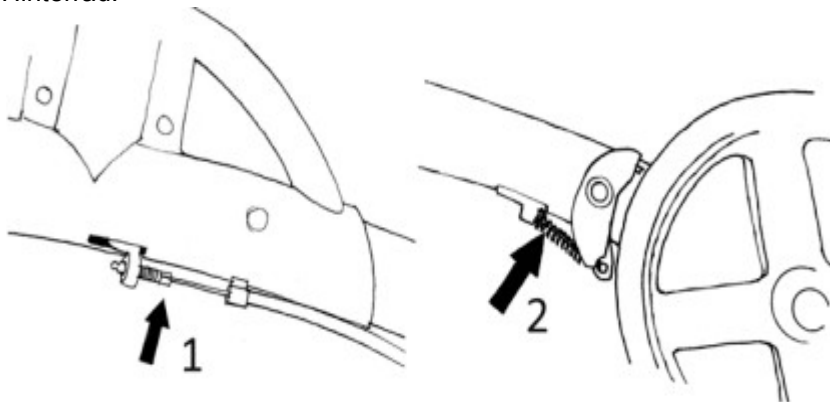

Fehlersuche

Wenn der S7 nach einer Seite zieht, ist zu kontrollieren, dass die Räder leicht laufen und die Radgabeln sich leicht drehen. Räder und Gabeln sind auf festen Sitz zu prüfen. Sehen Sie auch nach, ob sich Schmutz oder Ähnliches zwischen Rädern und Bremsbacke festgesetzt hat.

Keine oder ungleichmässige Bremswirkung


Überprüfen Sie den Bremsdraht in Handgriff und Bremsarm auf festen Sitz. Ebenso, dass die Feder am Bremsarm unbeschädigt ist.

Überprüfen Sie, dass die Bremsbacke beim Bremsen richtig auf das Rad aufsetzt, und zwar gleichmässig auf beiden Seiten. Justieren des Bremsdrahts, siehe Seite 6.

Sicherheitszubehör


Schleifbremse

Eine Bremse mit einstellbarer kontinuierlicher Reibungswirkung. Kann später eingebaut werden.

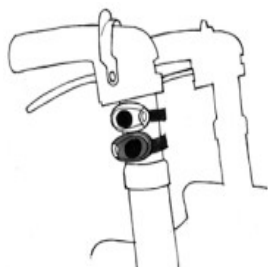


Beleuchtung

Wird am Rahmen festgeklemmt. Rotes Licht nach hinten, weisses Licht nach vorn. Leicht abzubauen, leichter Batteriewechsel.

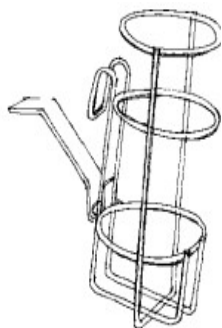

Stockhalter

Zwei Teile, die am hierfür vorgesehenen Platz festgeschraubt werden. Halten Gehstock, Krücke oder Tropfgestell sicher fest.

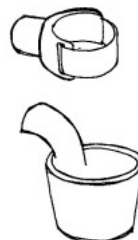


Halter für Sauerstoffflasche

Robuster Stahlkorb mit Befestigungsvorrichtung, wird an den Sitz gehakt, ist auch leicht wieder abzunehmen.

Rückengurt

Robuste Stütze für den Rücken, die ein höheres Sicherheitsgefühl verleiht. Wird mit zwei Schrauben in den vorhandenen Haltevorrichtungen befestigt.

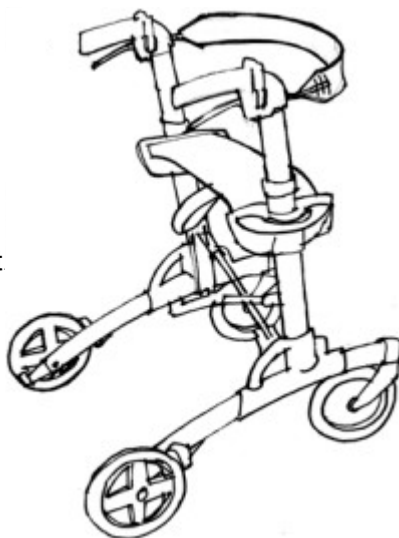


Komfortzubehör

Flaschenhalter

Flaschenhalter aus kräftigem Kunststoff. Bietet Platz für 0,5 Liter Dosen oder

Flaschen. Wird an den Handgriff gehängt..

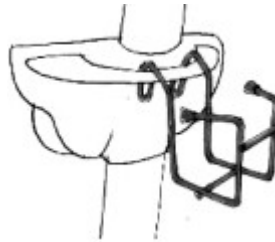


Stofftasche

Eine weiche Stofftasche aus gewebtem Nylon, die auch bei zusammengeklapptem Rollator an ihrem Sitz bleibt. Leicht abzunehmen, waschbar.

Korb

Robuster Korb aus Metallnetz. Leicht an den S7 zu haken. Tragegriffe.

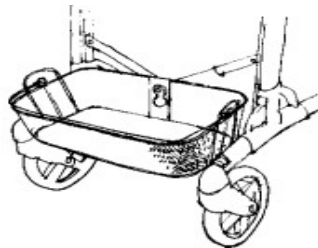

Tablett

Tablett in weiß, das auf dem Sitz des Rollators abgesetzt wird.

Garantie

Volaris gewährt zwei Jahre Garantie auf den S7. Die Garantie umfasst keine Verschleissteile wie Handgriffe, Bremsdraht oder Räder. Die Garantie gilt ferner nicht bei unsachgemäßer Behandlung des Rollators oder bei ohne unsere Mitwirkung am Rollator vorgenommenen Änderungen.

Hergestellt in Schweden

Der S7 ist in Schweden entwickelt und hergestellt. Damit können wir für Funktion und Qualität garantieren. Material und Komponenten sind sorgfältig ausgewählt.

Ca. 95 % des S7 sind wieder verwertbar.

Der S7 erfüllt alle auf dem Markt geltenden Normen: SS-EN 1441, SS-EN 1985, SS-EN 12182 sowie ISO 11199-2:2005 und ist vom Hilfsmittelinstitut in Dänemark zugelassen.



Volaris Sweden AB

Brostigen 4, SE-334 33 Anderstorp, Schweden

Telefon + 46 371-189 90 Fax + 46 371-189 82

E-mail: info@volaris.se Internet: www.volaris.se