

## Rekonditionierungsanweisung, Anleitung und Service für Volaris Rollatoren

### Räder

Überprüfen, dass/ob	Maßnahme	Kommentar	ok
die Räder nicht beschädigt sind und das Kugellager keine üblen Geräusche abgibt	Das Rad muss leicht rollen, sonst ist das Rad auszutauschen (defektes Lager).	Beim Austausch von Rädern auch Sicherungsmutter austauschen.	
die Laufflächen nicht beschädigt sind.	Rad austauschen.	Neue Sicherungsmutter	
die Schrauben nicht lose sind.	Schrauben festziehen (Schraubensicherungsmittel verwenden, Loctite 270)		
Wenn keine Sicherungsmutter vorhanden.	Neue Sicherungsmutter (Schraubensicherungsmittel verwenden, Loctite 270)		
die Vordergabel ordentlich am Gestell sitzt.	Vordergabel ordentlich mit Nylock-Mutter festziehen (alternativ Schraubensicherungsmittel verwenden, Loctite 270)		
die Vordergabel nicht beschädigt ist.	Vordergabel austauschen.		

---

## Bremsen

Überprüfen, dass/ob	Maßnahme	Kommentar	ok
der Bremsbelag nicht verschlissen ist	Bremsbelag austauschen.		
der Abstand zwischen Bremsbelag und Rad 1 mm beträgt.	Einstellen		
die Bremse ordentlich anzieht.	Einstellen, Bowdenzug schmieren.		
der Bremsenhandgriff nicht beschädigt ist.	Bremsenhandgriff austauschen.		
der Bremsenhandgriff ordentlich am Aluminiumprofil sitzt.	Schrauben festziehen, Bremsenhandgriff bei Bedarf austauschen.		
die Höheneinstellung der Handgriffe leichtgängig ist.	Profil austauschen.		
keine Schäden am Profil sind.	Profil austauschen.		

---

## Zusammenklappmechanismus

Überprüfen, dass/ob	Maßnahme	Kommentar	ok
das Zusammenklappen leichtgängig geht.	Am Kreuz mit etwas Fett schmieren.		
die Zusammenklappsperrle leichtgängig ist und verriegelt.	Zusammenklappsperrle austauschen.		
Schäden am Kreuz sind.	Kreuz austauschen.		

---

## Handgriff

Überprüfen, dass/ob	Maßnahme	Kommentar	ok
der Handgriff nicht beschädigt ist.	Handgriff-Griff austauschen.		

---

## Einstellungen

Überprüfen, dass/ob	Maßnahme	Kommentar	ok
die Höhenverstellung des Handgriffs ordentlich verriegelt.	Verriegelungsmechanismus austauschen.		
der Sitz eingestellt werden kann und verriegelt.	Sitz austauschen.		

---

## Rahmen

Überprüfen, dass/ob	Maßnahme	Kommentar	ok
keine mechanischen Schäden am Gestell sind.	Rollator verschrotten.		
keine Schäden am Lack sind.	Schäden mit Ausbesserungsfarbe reparieren.		

---

## Sitz

Überprüfen, dass/ob	Maßnahme	Kommentar	ok
der Sitz nicht beschädigt ist.	Sitz austauschen.		

---

## Rückenband

Überprüfen, dass/ob	Maßnahme	Kommentar	ok
das Rückenband / die Befestigung nicht beschädigt ist und dass die Schrauben ordentlich festgezogen sind.	Rückenband austauschen und Schrauben festziehen.		

---

## Rekonditionierung

Überprüfen, dass/ob	Maßnahme	Kommentar	ok
Bei einer Rekonditionierung in einer Waschanlage darf die Bremse des Rollators nicht angezogen sein. Der Rollator muss, bevor er verwendet und eingestellt wird, wieder bis auf Raumtemperatur abkühlen.	Waschkabinett 60 Grad unter 45 Minuten.		
Bei Handwäsche: Schmutz mit einem feuchten Tuch abwischen., dabei ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Darauf achten, dass sich kein Schmutz zwischen den Rädern und den Bremsbacken ansammelt, weil dadurch die Bremswirkung abnehmen kann! Der S7 SMART kann auch gut mit einem Hochdruckreiniger oder einem Gartenschlauch abgespült werden.	Rollator anschließend trockenwischen.		

---

Rollatormodell: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Service durchgeführt von

Name: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_